


Unser neuer Defi.

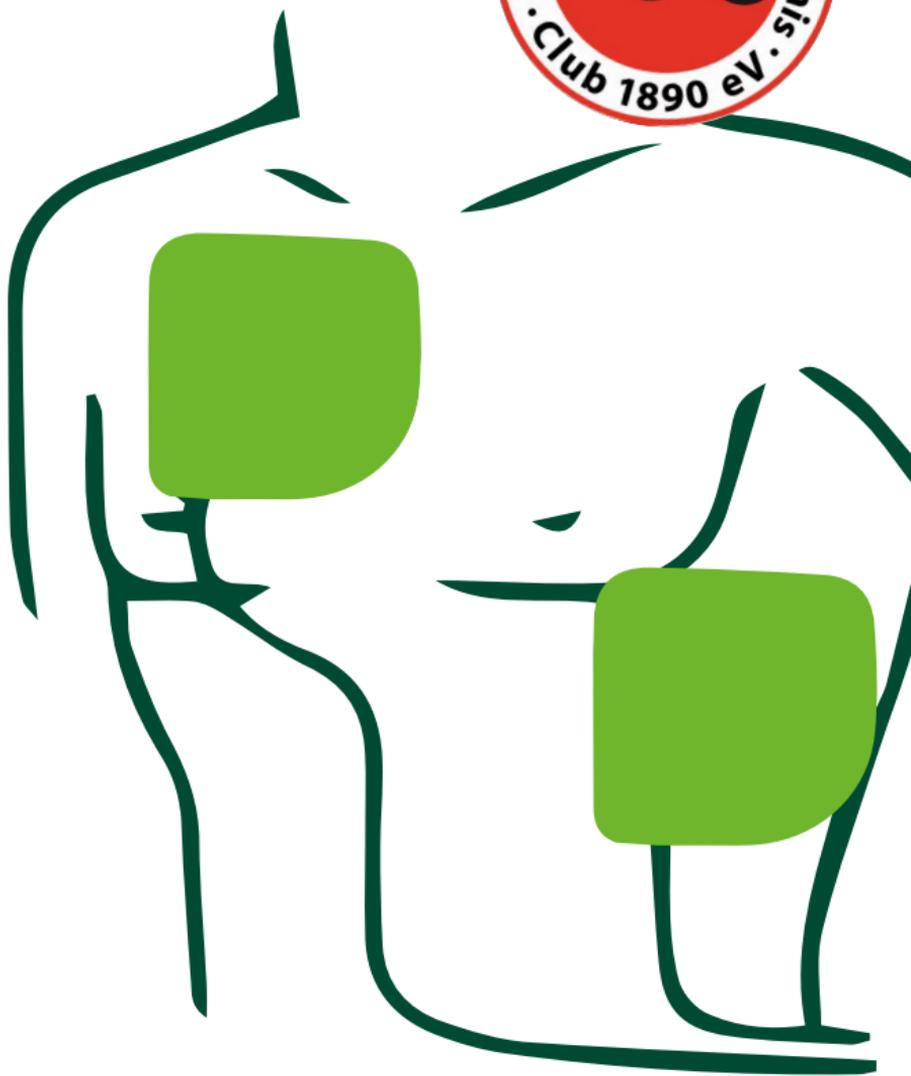

Informationen zum
Defibrillator (AED).



Erste Hilfe mit dem Defibrillator

Unser neuer Defi.

Hallo liebes Vereinsmitglied,

wir haben unseren Verein **herzsicher** gemacht und für die Hockeyabteilung und die Tennisabteilung **jeweils einen Defibrillator angeschafft**.

Der HeartSine 350P ist ein Defibrillator für Laien, das heißt jeder kann den Defibrillator bedienen.

Im Falle eines Herzstillstandes führt der SAM 350P den Ersthelfer durch gesprochene und visuelle Anweisungen durch die Reanimation.

In diesem Flyer findest Du :

1. Skizzen, wo die Defibrillatoren zu finden sind
2. Wie sehen die neuen Defibrillatoren aus. Welche Anzeigen und Bedienelemente gibt es?
3. Welche Schritte soll der Ersthelfer generell in einer Notfallsituation beachten?

Herzliche Grüße,

Euer Vorstand



HIER FINDEST DU UNSERE NEUEN DEFIS



Eingang Hockeyclub



Eingang Tennisclub

Übersicht zum Gerät

Wie funktioniert der neue Defi?

EIN/AUS Schalter

Schock-Taste

Drück diese Taste, um einen therapeutischen Schock nach Aufforderung abzugeben.



Lautsprecher

Der Defi sagt genau, was zu tun ist. Durch gesprochene Anweisungen bekommst Du eine **Schritt-für-Schritt-Anleitung** zur Ersten Hilfe.

ANSPRECHPARTNER:

CHTC Kontakt

Telefon 02151 – 59 37 44

E-Mail: info@chtc.de

Meldet Euch bei Fragen auch gern bei unserem Defi-Partner AED KREFELD
www.aed-krefeld.de

Überblick im Notfall

Frühzeitiges Erkennen und Handeln



Wenn die Person nicht ansprechbar ist und keine Atmung-/Puls vorhanden ist...



NOTRUF wählen.

Herzdruckmassage* durchführen und schnellstmöglich den Defi holen (lassen).



DEN ANWEISUNGEN DES DEFIL FOLGEN. DU KANNST NICHTS FALSCH MACHEN.

***Mindestens:** einfaches Pressen, ca. 100 x pro Minute, 6 cm tief.
Noch besser: nach 30 x Pressen, 2 x Beatmen.
Wichtig: Nach jedem Pressen wieder vollständig entlasten, damit sich die Herzkammern erneut füllen können.

**AED
KR**

**JEDE SEKUNDE ZÄHLT
SCHAUE HIER WORAUF
ES ANKOMMT!**



**Innerhalb von DREI Minuten
muss der Defi eingesetzt werden.**

Liegt eine Herzrhythmusstörung wie Kammerflimmern vor, so sinkt die Überlebenschance der betroffenen Person in jeder Minute um ca. 10%. Um Leben zu retten, muss der AED innerhalb kürzester Zeit zum Einsatz kommen.

**Man kann mit dem AED/Defibrillator
nichts falsch machen.**

Der AED/Defibrillator ermittelt automatisch den Herzrhythmus der bewusstlosen Person. Ein Stromstoß wird nur freigegeben, wenn er medizinisch unbedingt erforderlich ist. Man kann der betroffenen Person mit dem AED/Defibrillator keinen Schaden zufügen.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

Kann ich den Defi selbst einsetzen?

Ja, im Notfall geht es um jede Sekunde. Prüfe, ob die betroffene Person bewußtlos ist und nicht atmet. Informiere aber, wenn möglich, andere und rufe um Hilfe.

Woher weiß ich, was zu tun ist?

Der Defi sagt Dir im Notfall genau, was Du tun musst. Durch gesprochene Anweisungen bekommst Du eine **Schritt-für-Schritt-Anleitung**. Sobald der Defi eingeschaltet wird, startet die Sprachansage.

(Siehe *Übersicht zum Gerät* in diesem Flyer)

Kann ich mit dem Defi jemanden schädigen?

Nein, der Defi misst über die Klebeelektroden auf der Brust genau, ob ein Schock notwendig ist oder nicht. Nur wenn der Schock überlebenswichtig ist, gibt der Defi die Schocktaste frei. Wenn kein Schock notwendig ist, kann kein Schock abgegeben werden.

Kann ich nicht einfach auf den Rettungsdienst warten?

Nein, im Notfall ist es sehr wichtig, schnellstmöglich zu helfen (**innerhalb von drei Minuten**). Rettungsdienste können häufig nicht rechtzeitig vor Ort eintreffen. Wichtig ist die schnelle Hilfe durch Menschen wie Dich, um dem Betroffenen das Leben zu retten.

**AEDs/Defis mit
Schulung für
Unternehmen,
Vereine & Praxen.**

www.aed-krefeld.de

